

## G004

Gel spray pentru ECG în flacon de 230ml

GELUL SPRAY pentru ECG este un produs de înalt calitate conceput pentru facilitarea aderenței între piele și electrozii pentru ECG.

GEL ECG nu oxidează, nu lasă resturi permanente pe electrozi și este ușor de îndepărtat. Datorită compoziției sale speciale și a altor substanțe de degresare și igienizare pe care le conține, acesta permite reutilizarea electrozilor de uz multiplu, chiar și în condiții frecvente, ducând la creșterea atât a duratei de utilizare a acestora, cât și a raportului igienic de la pacient la pacient.

Conține ca bactericid Euxyl® K 100, ale cărui componente active sunt Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.  
Este conform cu norma privind bio-compatibilitatea ISO 10993-1.

### AVERTIZĂRI

- Exclusiv pentru uz extern
- Produsul livrat este nesteril.
- Nu aplicați gelul pe ochi sau pe pielea care prezintă iritații, abraziuni sau răni.
- Produsul poate provoca iritația sau înroșirea pielii, mai ales persoanelor alergice sau sensibile.
- Nu înghițiți produsul.
- Nu folosiți gelul după data scadenței, indicată pe flacon.

### MĂSURI DE PRIM AJUTOR

- Ochi: În caz de contact accidental cu ochii, clătiți cu o cantitate abundentă de apă, timp de 15 minute. Dacă iritația persistă, consultați un medic.
- Piele: dacă pielea devine iritată, spălați cu apă, în mod atent. Dacă iritația persistă, consultați un medic.
- Ingestie: în mod normal, ingestia accidentală nu prezintă riscuri, însă dacă apar complicații, consultați un medic.

### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Persoanele sensibile la MCI/MI trebuie să poarte mănuși de protecție în timpul utilizării produsului.
- Curățați și degresați pielea pacientului.
- Aplicați GELUL SPRAY G004.
- Aplicați și conectați electrodul și aparatura, conform instrucțiunilor de utilizare, puse la dispoziție de producătorul acestora.
- După procedură, îndepărtați resturile de gel folosind hârtie, TNT sau bumbac umezit cu apă.

### GARANȚIE ȘI LIMITĂRI

FIAB SpA garantează că produsul este conform cerințelor Directivei 93/42/CEE și a fost realizat conform procedurilor Sistemului de Calitate certificat ISO 13485. Producătorul nu va putea fi tras la răspundere, în nici un fel și nu își va solicita cheltuieli medicale sau daune directe sau indirecte, care sî derivate din nefuncționarea sau anomaliile modelelor menționate mai sus, în cazul în care produsele sunt utilizate în mod diferit de cel prevăzut în prezentele instrucțiuni de utilizare. Se recomandă informarea imediată a Serviciului de Asigurare a

Calit ții FIAB pentru orice nefuncționare sau defect, despre care afl , cu privire la acest dispozitiv.

#### **ELIMINAREA CA DE EU**

De eurile care provin de la unit țile sanitare trebuie eliminate conform normelor în vigoare. Gelul este solubil în apă și nu reprezintă o sursă de poluare pentru mediul înconjurător. Recipientul poate fi aruncat în container-ul specific colectării selective a deeurilor.

---

*Subsemnata MARCU ALINA BIANCA, interpret și traducător autorizat pentru limbile străine italiană și engleză, în temeiul autorizației nr.31329, din data de 08.04.2011, eliberată de Ministerul Justiției din România, certifică exactitatea traducerii efectuate din limba italiană în limba română, în conformitate cu documentul original care mi-a fost prezentat, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.*

INTERPRET ȘI TRADUCĂTOR AUTORIZAT

MARCU ALINA BIANCA

Traducător și Interpret Autorizat  
MARCU ALINA-BIANCA  
Aut. M. J. Nr. 31329 / 2011  
Limbile Engleză - Italiană

---

52500769IU4C



**FIAB**® Via Costoli, 4 – 50039 – Vicchio  
(Florența, Italia) – [www.fiab.it](http://www.fiab.it)