

GEL PENTRU ULTRASUNETE/ECOGRAFII (GEL ECO)

G002 – plic de 20ml.

G006 – flacon de 260 ml.

G007 – flacon de 1000 ml.

G0064 – pung de 5000 ml – conține un flacon (gol) de umplere de 260 ml.

G0066 – bidon de 5000 ml – conține un flacon (gol) de umplere de 260 ml.

G0066KIT – 6 bidoane de 5000 ml, conțin 6 flacoane (goale) de umplere de 260 ml și un dozator.

G0067 – Dozator pentru bidon.

G0068 – Dozator pentru pung

G0069 – Dozator pentru flacon 1000ml

G0084 – incolor, pung de 5000ml – conține un flacon (gol) de umplere de 260 ml.

G0086 – incolor, pung de 5000ml – conține un flacon (gol) de umplere de 260 ml.

G008 – incolor, flacon de 260 ml

G009 – incolor, flacon de 260 ml

G010 – incolor de densitate mare, recipient de 1000ml.

GEL ECO este un produs de înalt calitate, având caracteristici excelente de transmitere a ultrasunetelor și de alunecare a sondei, care se păstrează constante timp îndelungat.

Gelurile incolore (G008, G0084, G009 și G010) sunt indicate și pentru aplicațiile IPL.

GEL ECO nu oxidează, nu conține substanțe gazoase, nu lasă reziduuri permanente pe sonde și este ușor de îndepărtat.

Conține ca bactericid Euxyl® K 100, ale cărui componente active sunt Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Este conform cu norma privitoare la biocompatibilitate ISO 10993-1.

Nu conține formaldehid.

Nu dăunează sondei aparatului de ecografie.

AVERTIZĂRI

- Exclusiv pentru uz extern.
- Nu folosiți pentru înregistrări electrocardiografice.
- Produsul este furnizat nesteril.
- Nu aplicați gelul pe ochi sau pe pielea care prezintă iritații, abraziuni sau răni.
- Produsul poate provoca iritația sau înroșirea pielii, mai ales la persoanele alergice sau sensibile.
- Nu ingerați.
- În aplicațiile IPL, caracteristicile gelului pot să se deterioreze odată cu utilizarea: nu refolosiți pe alte părți ale corpului gelul deja folosit.
- Închideți ambalajul după utilizare.
- Nu folosiți gelul după data scadenței indicată pe flacon.
- Pungile sunt dotate cu o duză pentru facilitarea transferului de gel. După prelevare, scoateți duza și reintroduceți dopul pentru o păstrare corectă a gelului.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

- **Ochi:** în caz de contact accidental cu ochii, clătiți cu o cantitate abundentă de apă timp de 15 minute. Dacă iritația persistă, consultați un medic.
- **Piele:** dacă pielea devine iritată, spălați cu grijă, cu apă și puneți. Dacă iritația persistă, consultați un medic.

- **Ingestie:** de obicei, ingestia accidentală nu presupune riscuri, dar în cazul în care apar complicații, consultați un medic.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Persoanele sensibile la MCI/MI trebuie să poarte m. nuși de protecție în timpul utilizării produsului.
- Aplicați gelul GEL ECO în cantitatea dorită.
- Conectați și utilizați aparatul și sondele conform instrucțiunilor de utilizare furnizate de producătorul acestora.
- După procedură, îndepărtați reziduurile de gel, folosind hârtie, TNT sau bumbac umezit în apă.
- Pentru aplicațiile IPL, întindeți un start uniform de gel, conform instrucțiunilor furnizate cu aparatul pentru IPL.

GARANȚIA ȘI LIMITĂRILE

FIAB SpA garantează că produsul este conform cerințelor directivei 93/42/CEE și că a fost fabricat conform procedurilor Sistemului de Calitate certificat EN ISO 13485. Nu va putea fi imputat nicio răspundere producătorului, care nu va fi obligat să acorde despăgubiri pentru cheltuielile medicale sau pentru daunele directe sau indirecte, care rezultă din nefuncționarea sau anomaliile modelelor menționate mai sus, în cazul în care produsele sunt utilizate altfel decât conform prevederilor prezentelor instrucțiuni de utilizare. Vă recomandăm să informați imediat Serviciul de Asigurați al FIAB pentru orice funcționare defectuoasă sau defect, despre care aveți cunoștință, cu privire la acest dispozitiv.

ELIMINAREA (CA DE EU)

Deșeurile care provin de la unitățile medicale trebuie să fie eliminate conform normelor în vigoare. Gelul este solubil în apă și nu reprezintă o sursă de poluare pentru mediul înconjurător. Recipientul poate fi aruncat prin colectarea diferențiată.



Subsemnata MARCU ALINA BIANCA, interpret și traducător autorizat pentru limbile străine italiană și engleză, în temeiul autorizației nr.31329, din data de 08.04.2011, eliberat de Ministerul Justiției din România, certifică exactitatea traducerii efectuate din limba italiană /engleză în limba română, în conformitate cu documentul original care mi-a fost prezentat, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

INTERPRET ȘI TRADUCĂTOR AUTORIZAT
MARCU ALINA BIANCA

Traducător și Interpret Autorizat
MARCU ALINA BIANCA
Aut. M.J. Nr. 31329 / 2011
Limbile Engleză - Italiană



CartoMed
echipamente medicale și consumabile