

## Instrucțiuni brasardă pentru măsurarea tensiunii arteriale

● **Denumire produs și specificații:** Consultați eticheta produsului


● **Domeniu de utilizare:**

Folosește presiunea pe care contracta și expansiunea vasculară o exercită asupra brasardei, pentru a colecta și a transmite semnalele tensiunii arteriale. Pot fi efectuate asupra pacienților măsurători non-invasive ale tensiunii arteriale.

● **Contraindicații**

Nu utilizați acest produs la pacienții cu leziuni tisulare; brasarda nu poate fi conectată la sistemul circulator, care va pompa aerul în vasele de sânge, ceea ce duce la leziuni grave pentru pacienți.

**Structura produsului**

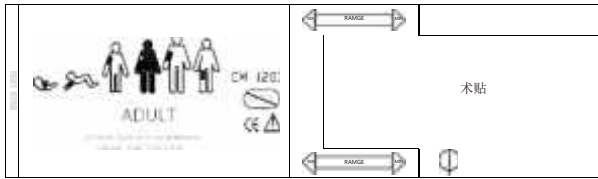

Ne-sterilizat




Notă: fișier atașat


Acest produs este alcătuit din curele, tuburi de aer, pompă de aer, un total de trei piese; curelele sunt fabricate din material Oxford rezistent la apă; contact din Velcro nailon; conducta de aer din furtun PVC; balon TPU presiune diafragmă. Nu conține piese fabricate din latex.

● **Atenție**

- Numai brasardele și sistemele gonflabile pot fi conectate la sistemele non-invasive de monitorizare a tensiunii arteriale.
- Nu conectați brasarda la sistemul circulator; acest lucru ar duce la pomparea aerului în vasele de sânge, cauzând leziuni grave la pacienți.
- Pentru a asigura precizia măsurătorii, mișcările membrelor și ale brasardelor trebuie reduse la minimum.
- Evitați atingerea brasardei în timpul detectării; acest lucru ar putea duce la măsurători imprecise ale tensiunii arteriale.
- Frecvența măsurătorilor nu trebuie să depășească numărul necesar clinic, cântărit beneficiile și riscurile.
  - Verificați întotdeauna banda brasardei și membrele, pentru a vedea dacă există semne de obstrucționare a fluxului sângelui, mai ales când se efectuează frecvent determinări și teste o perioadă lungă de timp. Dacă este necesar, schimbați poziția benzii brasardei.
- Când testul este încheiat, brasarda trebuie luată de la pacient
- Nu înfășurați brasarda în locurile unde ar putea afecta infuzia intravenoasă sau circulația sângelui.
- Nu aplicați brasardele în zonele unde pielea este incompletă sau deteriorată. Asigurați-vă că brasardele sunt închise, iar suprafața aspră nu este în contact cu pielea; în caz contrar, îl va irita pe pacient.
- Dacă lățimea brasardei este mai mare decât lungimea bratului pacientului, de la axilă la cot, înlocuiți cu celelalte brasarde.
- Brasarda trebuie să fie strânsă atât cât este necesar, lăsând o lățime de aproximativ un deget între corpul pacientului și brasardă.

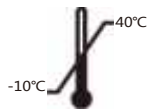

Limita de temperatură

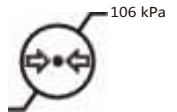

86 kPa

Limită presiune atmosferică

● **Instrucțiuni**

- Înainte de deschiderea ambalajului, vă rugăm să verificați dacă acesta este complet: 1 copie a manualului produsului PCG.
- Pentru a alege un loc adecvat brasardei, partea superioară a bratului este prima alegere, pentru că este relativ ușor de măsurat. Când nu este convenabilă alegerea părții superioare a bratului, se recomandă alegerea părții superioare a piciorului pentru amplasarea brasardei.
- Selectați dimensiunea adecvată a brasardei pentru pacient, în funcție de lista specificațiilor produsului.

● **Întreținerea, curățarea, dezinfectarea și sterilizarea**

- Pregătiți produsele de curățare pe bază de enzime (ENZOL @ fabricat în SUA sau Cidezime Enzyme Cleanser fabricat în UK sau echivalentele și apă distilată) și 10% înălbitor, în recipient cu pulverizator.
- Pulverizați detergentul uniform pe furtunul brasardei; dacă mizeria este uscată, așteptați ca agentul de curățare să penetreze produsul timp de 1 minut.
- Ștergeți suprafața netedă cu o cârpă curată și ștergeți petele vizibile cu o perie moale.
- Clătiți cu apă distilată din abundență.
- Pentru a dezinfecta, pulverizați soluție cu 10% înălbitor peste toată brasarda și lăsați produsul să stea așa timp de 5 minute.
- Ștergeți soluția în exces și clătiți din nou cu apă distilată. Lăsați brasardele să se usuce natural.

● **Durata de utilizare**

Se recomandă înlocuirea acesteia o dată la 6 luni; în caz de continuare a utilizării, vă rugăm să evaluați acest lucru și să efectuați o inspecție strictă.

● **Metoda de depozitare**

După ce produsul este curat și uscat, așezați-l într-o pungă din plastic, sigilată și depozitați-o într-un loc curat și ventilat. Cerințe ambientale: Temperatură: -10 ~ + 40C, umiditate relativă: nu mai mult de 80%, presiune atmosferică: 86Kpa~106Kpa

● **Serviciul de garanție**

Reparație gratuită, rambursare și schimbarea produselor defecte cu unele noi; vă rugăm să consultați agenții locali de vânzări, pentru detalii.

● **Data fabricației, durata de utilizare**

Indicate pe etichetă (folosiți timp de maximum 24 de luni)



Eliminarea deșeurilor



**Producător :SHENZHEN YKD TECHNOLOGY CO.,LTD.**

Adresa: 6F, Building 6. Huaxinruiming Industrial Area, Langrong RD,Xinwei Village, Dalang Community, Dalang Street, Longhua, Shenzhen, China.  
Registered Address:6F, Building 6. Huaxinruiming Industrial Area, Langrong RD,Xinwei Village, Dalang Community, Dalang Street, Longhua, Shenzhen, China.  
Service Address:6F, Building 6. Huaxinruiming Industrial Area, Langrong RD,Xinwei Village, Dalang Community, Dalang Street, Longhua, Shenzhen, China.  
TEL:0755-61116858 Service Call:0755-61186229 Email:sales1@ykdmed.com  
Zip Code:518109 Website:www.ykdmed.com



Subsemnata MARCU ALINA BIANCA, interpret și traducător autorizat pentru limbile străine italiană și engleză, în temeiul autorizației nr.31329, din data de 08.04.2011, eliberată de Ministerul Justiției din România, certifică exactitatea traducerii efectuate din limba italiană/engleză în limba română, în conformitate cu documentul original care mi-a fost prezentat, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

INTERPRET ȘI TRADUCĂTOR AUTORIZAT  
MARCU ALINA BIANCA

Traducător și Interpret Autorizat  
MARCU ALINA-BIANCA  
Aut. M.J. Nr. 31329 / 2011  
Limbile Engleză - Italiană